

Sicherheitsschuhe

Arbeitssicherheits-Stabilschuh / S3
(gemäß EN ISO 20345:2007)

GEPRÜFT

Baumustergeprüft durch den
TÜV Rheinland nach Richtlinie
89/686/EWG Artikel 10
zuletzt geändert durch
Richtlinie 96/58/EWG



OrthoTECH[®]



In bestimmten Berufen muss die Arbeitssicherheit gewährleistet sein. Die passende Berufskleidung und insbesondere spezielle Arbeits-Sicherheits-Schuhe sind hierbei unabdingbar.

Normale Sicherheitsschuhe von der Stange können bei orthopädischen Problemen Beschwerden verursachen. Wissenschaftliche Studien belegen, dass mehr als die Hälfte der erwachsenen Bevölkerung an Fußproblemen leidet und sich diese auf den gesamten Bewegungsapparat auswirken. Eine verminderte Leistungsfähigkeit und eine eingeschränkte Lebensqualität sind die Folge.

Eine Veränderung des konfektionierten Sicherheitsschuhs durch individuelle orthopädische Einlagen oder spezielle Schuhzurichtungen ist seit 2007 nicht mehr erlaubt. Es verstößt gegen die BGR 191, die Baumusterprüfung erlischt und somit auch der Versicherungsschutz.

Die Lösung: Sicherheitsschuhe von Orthotech!

Der OrthoTECH Stabil-Safety und OrthoTECH Safety-Control sind nicht nur als fertige Arbeitssicherheitsschuhe erhältlich, die durch den vorschriftsgemäßen Einsatz orthopädischer Schuheinlagen alle Voraussetzungen der BGR 191 erfüllen. Auf Wunsch können Schaft und Sohle auch getrennt geliefert werden, um die Schuhe durch eine individuelle Zurichtung optimal an die Patientenbedürfnisse anzupassen. Auch in diesem Fall ist bei vorschriftsmäßiger Handhabung keine erneute Zulassung nötig.

Orthotech Sicherheitsschuhe!

Mit dem Stabil-Safety und Safety-Control von Orthotech haben wir die Arbeitsschutzbestimmungen mit bestmöglicher Funktion und Tragekomfort vereint.

Er schützt nicht nur vor Fußverletzungen in Ausübung der Tätigkeit, sondern beugt durch die gelenkschonende Fußstellung Verschleiß vor und verhindert durch seine Passgenauigkeit Schmerzen.

Wir kümmern uns um Ihre Gesundheit und die erforderliche Rechtssicherheit und haben professionelle Schuh- und Einlagenlösungen für alle orthopädischen Probleme in Kombination mit Sicherheitsschuhen!

Wir versorgen Sie mit unserem persönlichen Schutzkonzept für Ihre Füße: **Individuell. Passgenau. Sicher.**

Atmungsaktivität

Der Stabil-Safety und Safety-Control bestehen aus einem Microfaser-High-tec-Material, das bereits seit mehreren Jahren in der Mikroelektronik verwendet wird. Dieses erprobte Material sorgt für höchste Wasserdampf-Durchlässigkeit (> 10 mg/cm²/h nach EN ISO 20345:2004) und übertrifft damit Leder bei Weitem. Ein optimales Fußklima ist somit gewährleistet.

Alu-Kappe

Aluminium ist das neue Material, aus dem moderne Schutzkappen im Zehenbereich der Sicherheitsschuhe gefertigt sind. Es ist wesentlich leichter als herkömmliche Stahlkappen und damit ist der Schuh gelenkschonend und sein Tragekomfort weitaus höher.

Erhöhte Sicherheit geht einher mit Leichtigkeit und Bequemlichkeit im täglichen Arbeitseinsatz.

Spezielle Textilbrandsohle

Die durchtrittsichere Textilbrandsohle der Orthotech Sicherheitsschuhe ist besonders leicht und flexibel, Wärme und Kälte werden besser isoliert und die Fußfläche wird im Gegensatz zur Stahlsohle zu 100% abgedeckt.

Individuelle Maßeinlagen

- * Baumstergprüft
- * optimal elektrische Leitfähigkeit
- * Widerstand gegen Druck- und Stoßeinwirkungen



Außenranderhöhung/Pronation



Innenranderhöhung/Supination



Fersenerhöhung bis max. 10 mm



Mittelfußstütze, Pelotte



punktueller Entlastung (Fersensporen)



Individuelle Schuhzurichtungen



Außenranderhöhung/Pronation
bis 8 mm



Innenranderhöhung/Supination
bis 8 mm



Fersenerhöhung,
Verkürzungsausgleich bis 3,5 cm



Ballenrollen, Mittelfußrollen,
Schmetterlingsrolle jeweils bis 6 mm

Lieferumfang

Schaft und Sohle des OrthoTECH Stabil-Safety können für eine individuelle Schuhzurichtung getrennt geliefert werden. Bitte beachten Sie, dass nur das Gesamtpaket bestehend aus Schaft, Sohle und Leisten bestellt werden kann. Die Kosten für den Leisten werden Ihnen bei Rücksendung gutgeschrieben.



Vorteile des Stabil-Safety

- * Behandlung und Nachbehandlung von Sprunggelenksverletzungen
- * Zur Vorbeugung bei Patienten, die gehäuft Sprunggelenksverletzungen aufweisen
- * Ruhigstellung im Bereich von Fußwurzel und Mittelfuß
- * Gelenkschonung im Vorfußbereich
- * Sprunggelenksarthrose
- * Wackelsteifheit

Mehr Komfort

- * Abrollunterstützung durch Fersen-Absatzrolle
- * Dämpfung in der Ferse

Stabil-Safety / S3



Auch als Halbschuh Safety-Control / S3 erhältlich!



Sicherheitsschuhe – Schutzklasse S3

OrthoTECH Stabil-Safety und OrthoTECH Safety-Control

Orthopädische Zurichtung nach BGR 191:
ist auf dem rohgezwickten Schaft aufzubauen!

Geprüfte Klebstoffe:

- * Körplast 182 A (Härter: Köracur TR 280)
- * Renia Syntic Total

Geprüftes Aufbaumaterial:

- * +SG-Star Pur
- * In den Materialstärken 3 mm, 6 mm, 9 mm und 18 mm

Die orthopädische Zurichtung:

- * Ballenrolle bis 6 mm
- * Mittelfußrolle bis 6 mm
- * Schmetterlingsrolle bis 6 mm
- * Verkürzungsausgleich bis zu 3,5 cm
- * Außen- und Innenranderhöhung bis 8 mm

Individuelle Einlagenversorgung nach BGR 191:

Geprüfte Klebstoffe:

- * +SoftAstic 4822 von Mander-Malms (Hersteller Fuller Austria)

Geprüftes Aufbaumaterial:

- * +Pryx Antistatik

Individuelle Versorgung:

- * Aussenranderhöhung
- * Innenranderhöhung
- * Verkürzungsausgleich
- * Fersensporenlastung (Polsterung mit PPT)
- * Pelotte (muss zwischen Ober- und Unterteil eingearbeitet sein)

Kurzinfo

Baumusterprüfung

Sämtliche Veränderungen an einem Sicherheitsschuh dürfen die sicherheitsrelevanten Merkmale nicht beeinträchtigen. Außerdem muss der Schuh inklusive Schuhzurichtungen oder Einlagen als komplettes System baumustergeprüft sein.

Die BGR 191 sorgt dafür, dass nur geprüfte und freigegebene Bauteile und Materialien zur Herstellung verwendet werden.

Die Prüfung führt der TÜV Rheinland durch.

Rechtssicherheit

Das heißt, es müssen die Prüfkriterien

- * Ableitfähigkeit
- * elektrischer Durchgangswiderstand
- * Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich und
- * Widerstand gegen Druck- und Stoßeinwirkung erfüllt sein.

Nur so ist die Rechtssicherheit beim Einsatz gewährleistet.

Richtlinie 89/686/EWG Artikel 10 zuletzt geändert durch
Richtlinie 96/58/EWG

OrthoTECH[®]

OrthoTECH GmbH
Grubmühl 20, 82131 Stockdorf

Telefon: +49 (0)89 - 89 35 87 - 0
Telefax: +49 (0)89 - 89 35 87 - 20
E-Mail: info@orthotech-gmbh.de
Internet: www.orthotech-gmbh.de